

Funcionamento

1. Prepare o gesso conforme instrução do fabricante do gesso.
2. Gire o potenciômetro até selecionar a vibração desejada que será utilizada no trabalho. Ao girar o botão sentirá um clique e um led vermelho se acenderá indicando que o equipamento está ligado.
3. Coloque o anel ou moldeira na bandeja e introduza o gesso aos poucos até preencher todo o espaço.

Manutenção e Limpeza

1. Desligue o equipamento no potenciômetro e retire da tomada para realizar qualquer manutenção ou limpeza;
2. Para realização da limpeza da carenagem utilize um pano úmido com detergente líquido neutro ou álcool;
3. Para limpeza da base da bandeja é necessário girá-la no sentido anti-horário e ela se soltará. Já para limpeza da tampa emborrachada da bandeja puxe-a e ela se soltará da base. Essas partes podem ser lavadas, porém antes de encaixá-las observe se as mesmas não estejam molhadas; **EM HIPÓTESE ALGUMA SUBMERGIR O APARELHO EM ÁGUA OU QUALQUER LÍQUIDO.**

GARANTIA

Este produto passou por todos testes de resistência exigidos pelo nosso Controle de Qualidade e encontra-se apto para servi-lo durante muitos anos. A F²SA KERBUS assegura ao adquirente deste equipamento, garantia contra defeitos de matéria-prima e de fabricação, por doze (12) meses, a contar da data da sua aquisição comprovada mediante apresentação da respectiva Nota Fiscal do revendedor ao co sumidor, observando o que se segue+

* A garantia acima supra é a única garantia quer expressa, quer implícita, ficando excluídos quaisquer danos ou prejuízos indiretos, tais como (de forma meramente exemplificativa e não taxativa) lucros cessantes, interrupção de negócios e outros prejuízos pecuniários decorrentes de uso, ou da possibilidade de usar este aparelho.

* A F²SA KERBUS declara a garantia nula e sem efeito se for constatado por ela, ou pela Assistência Técnica Credenciada, que o equipamento sofreu dano causado por uso em desacordo com o manual de instruções, ligações à tensão de rede errada, acidentes (quedas, batidas, etc...), sobrecargas na rede elétrica, danos ou prejuízos causados por furto ou vandalismo, e ainda sinais de ha-ver sido violado, ajustado ou consertado por terceiros não autorizados.

*Os danos ou defeitos causados por agentes externos e demais peças que se desgastem naturalmente com o uso, ou por condições anormais de utilização, em hipótese alguma serão de responsabilidade do fabricante.



É de fundamental importância a completa leitura deste Manual e a obediência às instruções aqui contidas, para evitar possíveis danos ao aparelho ou a sua ineficácia

MANUAL DE INSTRUÇÕES

vibraker

VIBRADOR DE GESSO VIBRADOR DE YESO



MADE IN BRAZIL

F²SA
KERBUS
WWW.FSAKERBUS.COM.BR



Parabéns pela sua escolha!

O VIBRAKER da F²SA KERBUS é submetido a um rigoroso controle de qualidade e segurança, afim de oferecer o que ha de melhor em design, desempenho, qualidade, segurança e tecnologia.



ATENÇÃO

É de suma importância que sejam lidas todas as informações contidas neste manual, para a correta e perfeita utilização detodos os recursos que este equipamento oferece, evitando o uso inadequado, possíveis acidentes e danos ao equipamento. Após leitura e entendimento, guarde o manual, juntamente com a nota fiscal de compra e o certificado de garantia.

Características Técnicas:

Peso líquido: 1,600 kg

Peso bruto: 1,750 kg

Tensão: 110V/220V – Chave seletora.

Frequência: 50/60hz

Potência: 360w

Dimensões: 220 mm (comprimento), 189 mm (largura) e 110 mm (altura).

Aplicação:

O VIBRAKER é utilizado para eliminar as bolhas de ar nos materiais de moldagem e revestimento de gesso. Pode ser utilizado em consultórios odontológicos, consultórios médicos, laboratórios de prótese, clínicas, hospitais, etc.

Características:

- Carenagem injetada em ABS que facilita a limpeza pois o gesso não adere na mesma;
- Potenciômetro para escolha do nível de vibração;
- Possui ventosas para fixação que oferece a aderência do equipamento no local de trabalho e evita vibração e movimentação excessiva do mesmo;
- Led indicador de equipamento ligado;
- Bandeja removível para facilitar a limpeza após o trabalho;
- 12 meses de garantia conta defeitos de fabricação;


COMPONENTES




Instalação:

Instale o seu VIBRAKER em uma superfície plana, nivelada, lisa (de modo que o equipamento fique estável).

O VIBRAKER está ajustado para operar na tensão de 220v para que não haja danos ao equipamento ao ser ligado em voltagem errada, verifique a tensão correta da rede elétrica onde o equipamento será ligado, se houver necessidade de alterar para 127v altere a posição na chave seletora, que se encontra na parte de baixo do equipamento.

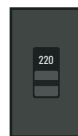

CHAVE SELETORA DE TENÇÃO

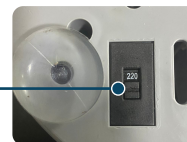

Obs.: Para uma melhor aderência das ventosas, aconselhamos molhar as mesmas antes de apoiar o equipamento na bancada ou mesa.